


## ECM, le spécialiste de la prévention de l'hypothermie !



- En toute sécurité
- Facile d'utilisation
- Fabrication française

Parce que des preuves cliniques ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, les couvertures chauffantes CR sont des systèmes de réchauffement actifs de patient, dédiés aux salles de réveil après chirurgie, et peuvent être aussi utilisées pour préchauffer la peau d'un patient avant opération.

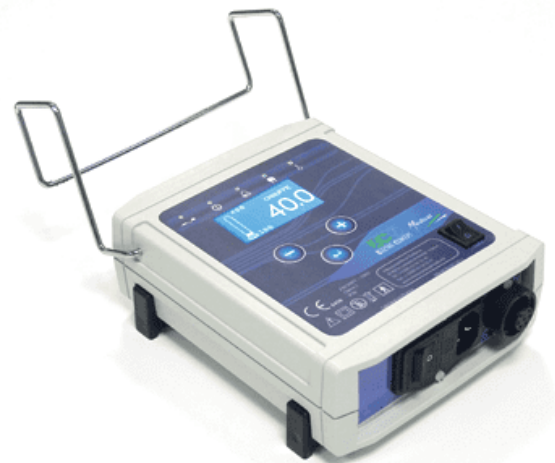

# Les couvertures chauffantes pour salle de réveil CR

Les couvertures chauffantes CR ne se servent pas de la technologie d'air pulsé mais possèdent un circuit intégré dans une cartouche (bruits et particules ainsi évités). Les coûts sont aussi maîtrisés car elles sont réutilisables et ne nécessitent pas de consommables. Elles ont pour objectif de prévenir la survenue d'une hypothermie chez le patients opérés et sont ainsi utilisées en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).

Les couvertures sont pilotées par un boîtier électronique de commande BCR avec clavier et affichage sur l'écran LCD.



## FACILE D'UTILISATION :

- Plusieurs tailles proposées toutes compatibles avec le même boîtier BCR.

*Largeur x Longueur*

CR11 Adulte : 100 x 150 cm

CR2 Enfant : 80 x 100 cm

CR1 Nourrisson : 40 x 45 cm → réchauffer le bébé sans rompre le lien avec la maman à la maternité

- Régler la température sur l'écran LCD du boîtier BCR et appuyer sur validation.
- Les couvertures recouvertes d'une housse en PU se nettoient très facilement après utilisation, avec une solution nettoyante et désinfectante de surface.



## EN TOUTE SÉCURITÉ :

- Equipées de 4 capteurs indépendants de température pour un fonctionnement précis et une sécurité maximum.
- Dotées d'alarmes sonores et visuelles pour alerter le personnel en cas de :
  - Rupture de l'élément chauffant ou conducteur dans la couverture
  - Défaut capteur de température
  - Trop grande différence de température
  - Température supérieure à 43°C
  - Coupure du courant
  - Défaut carte mère



## FABRICATION FRANÇAISE :

ECM conçoit et fabrique depuis 1991 des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier dans son usine de production à Saint Léonard de Noblat près de Limoges.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Couverture chauffante type réveil nourrisson	CR1+BCR
Couverture chauffante type réveil enfant	CR2+BCR
Couverture chauffante type réveil adulte	CR11+BCR

Le boîtier seul BCR et les couvertures seules sont aussi disponibles.

## LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

### Marquage CE 0459

Les couvertures chauffantes sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

### Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des couvertures chauffantes. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

### Garantie ECM

Les couvertures chauffantes ECM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,  
Une société de Spengler Group  
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40  
Mail : [contact@electroconceptmedical.fr](mailto:contact@electroconceptmedical.fr)  
Web : [www.electroconceptmedical.fr](http://www.electroconceptmedical.fr)